

作業（納品）報告書

FUJIFILM

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社

松山サービスステーション
松山市本町2-1-7松山東京海上日
動ビルディング 3F

TEL:050-3188-2350 FAX:089-945-3166

お客様名	(独)国立病院機構 四国がんセンター					御中
住所	松山市南梅本町甲160			受付No.	F455-2403-2094	
装置名	DHF-155H2			室名/製造番号	KC18633602	
納入日	2006年03月27日			保証	外	保守契約
システムナンバー	V5S203-DH45-2			無		
作業日	2024	年	03	月	16	日
開始時刻	13	時	00	分	15	時
終了時刻		時		分		時
作業時間	2	時	0	分	0	分
移動時間	0	時	0	分	0	分
作業者	福岡 勇人					

作業内容

②作業内容:スポット点検を実施しました。
詳細は別紙点検報告書をご覧ください。
点検済証No : F648313

使用測定器	()	()	X線管
品名・形式(資産・備品No.)	()	()	29115 回です
	()	()	
	()	()	

今回の費用は 有償です 別途請求させていただきます なお、上記作業(点検・修理・交換他)により交換した旧部品等は、 富士フイルムヘルスケア(株)が無償にて引き取らせて頂きます。	ご承認	完了区分	上記作業動作確認異常なし
		完了	【合格】

使用部品名・形式	数量	製造番号	備考(旧製番・スロットNo.・ロケーション等)
シリコンワッシャ	2		
シリコンオイル	2		
ガスケット	2		
お預り品	数量	製造番号	備考

下記の通り別途ご請求申し上げます。

品名	総合計		(消費税等を含む)
項 No	内訳	数量	金額

平素、弊社格別のお引き立てを受け賜り誠にありがとうございます。
御愛用頂いております上記装置の安定した機能と性能を維持し、
安心してお使いいただくために、保守代行契約をお奨めいたします。
詳細については、担当サービス員にお問い合わせ下さい。

コールセンターのご案内

ご利用の際は、下記システムナンバーをお知らせください

V5S203-DH45-2

電話受付窓口 (24時間年中無休)
フリーダイヤル
0120-889-825

DHF-153/155/158H II 定期点検報告書 B

FUJIFILM

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社

国立病院機構 四国がんセンター		代表製番	KC18633602	点検日	2024/03/16	技術者証番号MRC-	3489	X線管使用回数	29115 回	ご承認						
設置場所		X線室2	納入年月	2006/03/27	次回点検日		点検者	福岡 勇人	受付NO	F455-2403-2094 1						
ユニット	コード	点検項目・内容			基準	方法	結果	ユニット	コード	点検項目・内容		基準	方法	結果		
X線制御	B101	配電盤の電源配線(被覆・接続)			異常のないこと	確認	✓	その他	B130	胸部撮影台の固定(ねじ抜け・ゆるみ)		異常のないこと	確認	/		
	B102	配電盤のアース線(集中接続・緩み)			異常のないこと	確認	✓		B131	" カバー固定ねじ(抜け、バリ)		異常のないこと	確認	/		
	B103	低圧ケーブル・アース線(被覆・接続)			異常のないこと	確認	✓		B132	ブッキー撮影台の固定		異常のないこと	確認	✓		
	B104	電気部品の状態(破損、過熱、埃)			異常のないこと	確認	✓		B133	" 天板固定ねじ(抜け、バリ)		異常のないこと	確認	✓		
	B105	各表示器の指示及び動作			異常のないこと	確認	✓		B134	" 低圧ケーブル(被覆、接続)		異常のないこと	確認	✓		
	B106	各操作スイッチの動作、ランプの点灯			異常のないこと	確認	✓									
	B107	ハンドスイッチの動作			3年毎交換	確認	/									
	B108	操作卓固定(壁掛け式)(ねじ抜け・緩み)			異常のないこと	確認	✓		総合	B135 使用環境		温度	10~25℃	確認	✓	
	B109	エラー累積			異常のないこと	確認	✓						湿度	50~60%	確認	✓
	B110	カバー(ねじ抜け・緩み)				確認	✓				B136 使用条件での動作				確認	✓
										B137 装置を点検前のセット状態に戻す				確認	✓	
X線管	B115	サポータイングホークの固定			異常のないこと	確認	D	交換部品名		数量	交換部品名		数量			
	B116	X線管装置の固定			異常のないこと	確認	D	シリコンワッシャ		2	ガasket		2			
	B117	高圧ケーブル(屈曲・損傷)			異常のないこと	確認	✓	シリコンオイル		2						
	B118	低圧ケーブル、アース線(被覆・接続)			異常のないこと	確認	✓									
	B119	プラグのシリコングリス、パッキン交換			点検毎	交換	E									
絞	B120	可動絞りの固定			異常のないこと	確認	✓	特記事項 X線出力確認・調整実施しました。 エラー累積なし。								
保持装置	B121	天井・床への固定(ねじ抜け・緩み)			異常のないこと	確認	D									
	B122	操作器の固定(ねじ抜け・緩み)			異常のないこと	確認	D									
	B123	支柱上下動作(動作・異常音)			異常のないこと	確認	✓									
	B124	ワイヤロープ(素線切れ・キック・油切れ)			異常のないこと	確認	✓									
	B125	前後動作(動作・異常音)			異常のないこと	確認	✓									
	B126	左右動作(動作・異常音)			異常のないこと	確認	✓									
	B127	カバーの固定(ねじ抜け・ゆるみ)			異常のないこと	確認	D									
	B128	ケーブル押え金具(ねじ抜け・ゆるみ)			異常のないこと	確認	D									
	B129	ケーブル吊レール(固定・ストップ固定)			異常のないこと	確認	D									

点検結果の記号(✓:異常なし A:調整 B:修理 C:分解 D:締付 E:交換 F:清掃 G:注油 H:後日交換 T:特記事項参照 /:該当せず)

M-CP0005-1 (B)