
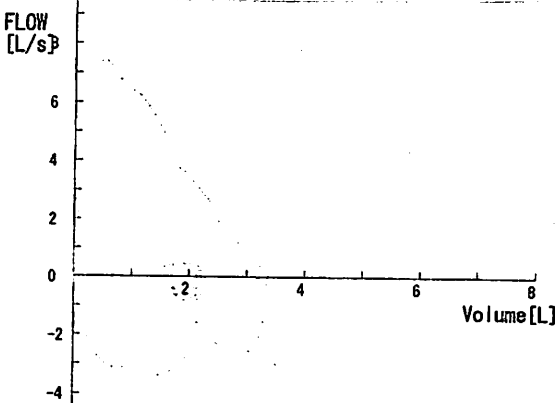



点検記録簿 (肺機能検査)

点検日 2023年 11月 1日	点検者	
型式 DISCOM-51	本体NO 510315	管理番号生理 0072
購入日 2023年 10月 31日		
電源コードに異常はないか	<input type="radio"/>	
装置外装に破損はないか	<input type="radio"/>	
電源投入時に異常はないか	<input type="radio"/>	
日付・時刻は正しいか	<input type="radio"/>	
ディスプレイ表示は正常か	<input type="radio"/>	
フローセンサーに異常はないか	<input type="radio"/>	
非喫煙健常者測定		
	1回目	2回目
VC	3.35 L	3.32 L
FVC	3.38 L	3.34 L
FEV1	3.05 L	3.06 L
1回目と2回目の変動が100ml以内		<input type="radio"/>
フローボリューム曲線	フローボリューム曲線	
		
フローボリューム曲線に変化がないこと		<input type="radio"/>
総合判定	異常なし	<input type="radio"/>
	一部問題があるが、使用に差しさえない。	
	使用に差しさえないが、日程を決めて修理が必要。	
	使用上問題があるため、緊急に修理が必要。	
備考	部門責任者	
		

結果：○ (問題なし)，結果：× (確認を行う)

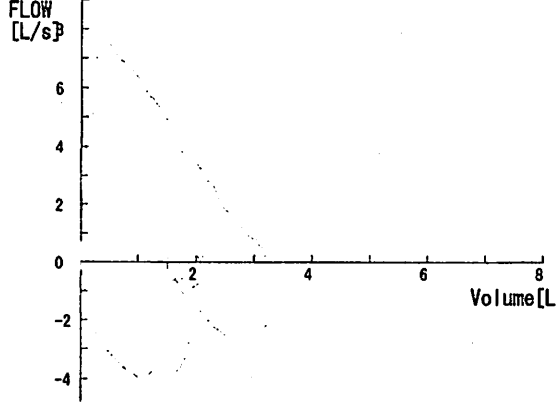

2024 年 6 月

検査機器保守管理作業日誌（肺機能1）

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
始業時	外観の異常がないこと			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	コード類の破損がないこと			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	電源投入時の表示が通常通り			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	機器の動作確認			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	肺機能環境データの確認			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	メッシュセンサの装着			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	肺機能キャリブレーション (ファクター：0.90～1.10以内)			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	肺機能精度管理 (測定データ：±3%以内)			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	バイオミクロンサークル（空気清浄機）の 外観に異常がない・電源ON			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	時間			8:30	8:30	8:30	8:30	8:40			8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30			8:30	8:30	8:30	8:30	8:30			8:30	8:30	8:30	8:30	8:30				
確認印			[Redacted]																															
終了時	使用済みスパイロフィルタ等の破棄、密閉			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	メッシュセンサの破棄			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	バイオミクロンサークル（空気清浄機） 電源OFF			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	消耗品の在庫確認			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
	時間			18:00	17:30	17:50	17:40	17:20			17:20	17:50	17:50	17:30	17:45			17:30	18:00	17:50	18:00	18:20	18:20			17:20	17:20	17:30	17:30	17:30				
確認印			[Redacted]																															
備考	修理・メンテナンス 機器清掃/動作確認			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/					
	バイオミクロンサークル（空気清浄機）の フィルター等の清掃（月1回）																																	

✓：問題なし ×：確認を行う