

点検記録簿（超音波検査）

報告日 2024 年 12 月 27 日		報告者			
機器名 EPIQ Elite		本体NO SZ424B1539	管理番号 生理0074		
購入日 2024年 6月 10日					
外装確認		点検日 2024/12/26	点検者		
電源に異常はないか			○		
ケーブルに破損はないか			○		
外観異常はないか			○		
機能チェック					
白黒プリンター			○		
パネルスイッチ			○		
バーコードリーダー			○		
画面表示機能			○		
安全性試験		点検日 2024/12/19	点検者		
接地漏れ電流	正常状態	150 μ A	500 μ A以内	○	
	単一故障状態	300 μ A	1000 μ A以内	○	
外装漏れ電流	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○	
	単一故障状態	152 μ A	500 μ A以内	○	
患者漏れ電流					
セクタ	X5-1c	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○
リニア	L12-3	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○
リニア	eL18-4	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○
コンベックス	C5-1	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○
マイクロコンベックス	mC7-2	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○
マイクロコンベックス	mC12-3	正常状態	1 μ A	100 μ A以内	○
性能試験		点検日 2024/12/23	点検者		
画質	総合感度	○		○	
	分解能	○			
総合判定	異常なし			○	
	一部問題があるが、使用に差しさえない。				
	使用に差しさえないが、日程を決めて修理が必要。				
	使用上問題があるため、緊急に修理が必要。				
使用計測器 Leak current checker : SS2098.00089					
評価	モーターのLANケーブルを抜いた安全性試験実施。			部門責任者	

○：問題なし ×：確認を行う