

輸液ポンプ定期点検報告書

実施する内容	1年定期点検		
医療機器名	フィルマ-ジョン輸液ポンプ		
製造販売業者名	(株)テルモ		
型式	TE-16LS	実施年月日	R6年3月12日
製造番号	1064000351	実施者名	宮田 陽翔
院内の管理番号	0030002073 NO.112	総合評価	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 再点検
項目	点検内容		評価
電气的安全性 点検	接地漏れ電流検査	正常状態 (500 μ A以下)	60 μ A
		単一故障状態 (1000 μ A以下)	103 μ A
	外装漏れ電流検査	正常状態 (100 μ A以下)	1 μ A
		単一故障状態 (500 μ A以下)	66 μ A
外観点検	機器本体に傷・汚れ・変形がない		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	スイッチ・ディスプレイに傷・汚れ・変形がない		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	電源コード及びプラグに傷・汚れ・変形がない		<input checked="" type="checkbox"/> 否
機能点検	電源の入/切ができる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	チューブクランプが正常に機能する		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	セルフチェックでランプ・ブザー・駆動系に異常がない		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	流量・予定量の設定が問題なくできる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	ブザー音量の切り替えができる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	キーロック操作ができる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	ヒストリー表示ができる (ショックの確認)		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	閉塞圧設定値の変更ができる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	日付・時刻の確認と設定ができる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	積算量が予定量に達したとき完了表示が出る		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	積算量がクリアできる		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	性能点検 精度管理	専用輸液セットを用い120mL/hrの設定で動作確認し \pm 7%以内 (インフュテスト結果)	
閉塞テストで閉塞警報が設定圧レベルで発生 (インフュテスト結果)		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
専用輸液セットを用い気泡を送り気泡警報が発生		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
満充電でバッテリーインジケータが3個点灯している		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
バッテリー期限の確認		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
交換部品 備考			

小型シリンジポンプ定期点検報告書

実施する内容	1年定期点検		
医療機器名	TE-361 小型シリンジポンプ		
製造販売業者名	(株)カニ		
型式	TE-361	実施年月日	R6年 2月 29日
製造番号	2010000051	実施者名	宮田 陽輔
院内の管理番号	005000/046 No.46	総合評価	合格 ・ 再点検
項目	点検内容		評価
外観点検	機器本体に傷・汚れ・変形がない		(合) ・ 否
	スイッチ・ディスプレイに傷・汚れ・変形がない		(合) ・ 否
	部品の緩み、ネジ・ナット等の緩みがない		(合) ・ 否
	電源コード及びプラグに傷・汚れ・変形がない		(合) ・ 否
機能点検	スライダーが左右へ移動できる		(合) ・ 否
	電源を入れた際のセルフチェックをパスする		(合) ・ 否
	開始・停止・早送り等のスイッチが正常に動作する		(合) ・ 否
	動作中・異常発生時のランプが点灯または点滅する		(合) ・ 否
	使用するシリンジをセットした場合に、シリンジサイズが正常に表示される		(合) ・ 否
	ブザー音量の切り替えができる		(合) ・ 否
	閉塞圧設定値の変更ができる		(合) ・ 否
	日付・時刻の確認と設定ができる		(合) ・ 否
性能点検	フックが正常に動作する		(合) ・ 否
	注入量の精度		(合) ・ 否
	警報発生およびブザー音の確認		(合) ・ 否
	残量警報発生時のシリンジの目盛は適切か		(合) ・ 否
	ライン閉塞状態で閉塞警報が発生する		(合) ・ 否
	LEDの表示が正確に点灯表示されている		(合) ・ 否
バッテリーの動作 (30分以上) 及びリフレッシュ			(合) ・ 否
交換部品 備考 バッテリー交換実施			

管理No	一般名称	番号	製品番号	使用開始日	定期点検月	点検日
0010001001	へネット840	1	3510083138	20090202	1月	2/22
0010001002	へネット840	2	3501990147	20130317	1月	2/22
0010002001	エビタ2200	3	ARXA-0274	20060301	1月	1/1キ
0010004001	V60	5	100248317	20180801	1月	1/28
0010001003	へネット840	6	3512171261	20181218	1月	2/22

管理No	一般名称	番号	製品番号	使用開始日	定期点検月	点検日
0020001001	TEC-7531	1	01157	20010619	2月	1/1キ
0020002001	TEC-5531	2	00663	20100218	2月	2/14
0020003001	TEC-6100	3	04489	20060614	2月	2/14
0020004001	TEC-5631	4	03390	20200123	2月	2/14

管理No	一般名称	番号	製品番号	使用開始日	定期点検月	点検日
0030001003	TE-161	3	01030305	20010501	4月	2/26
0030001005	TE-161	5	01030311	20010501	4月	5/31
0030001006	TE-161	6	01030312	20010501	4月	4/21
0030001007	TE-161	7	01030324	20010501	4月	10/31
0030001009	TE-161	9	01030343	20010501	4月	12/27
0030001010	TE-161	10	01030350	20010501	4月	12/28
0030001011	TE-161	11	01040165	20010501	4月	8/16
0030001012	TE-161	12	02020555	20020910	4月	6/5
0030001013	TE-161	13	02030219	20020910	4月	12/20
0030001014	TE-161	14	02030670	20020910	4月	10/23
0030001015	TE-161	15	02030832	20021231	4月	12/21
0030001016	TE-161	16	02030844	20021231	4月	11/24
0030001017	TE-161	17	02030850	20020910	4月	12/11
0030001018	TE-161	18	02030866	20020910	4月	12/26
0030001019	TE-161	19	02030872	20021231	4月	1/4
0030001020	TE-161	20	02030877	20020910	5月	11/24
0030001021	TE-161	21	02040023	20020910	5月	12/21
0030001022	TE-161	22	02040231	20020927	5月	4/19
0030001024	TE-161	24	02050089	20021031	5月	12/20
0030001025	TE-161	25	02050090	20020927	5月	5/8
0030001026	TE-161	26	02050099	20021031	5月	2/19
0030001027	TE-161	27	02050101	20021031	5月	1/15
0030001028	TE-161	28	02050102	20020927	5月	1/26
0030001029	TE-161	29	02050105	20020927	5月	7/12
0030001031	TE-161	31	02100019	20030331	5月	10/30
0030001035	TE-161	35	02120014	20021231	5月	12/21
0030001036	TE-161	36	02120027	20021231	5月	1/1キ
0030001038	TE-161	38	03030060	20031031	5月	1/15
0030001039	TE-161	39	03030073	20031031	6月	12/28
0030001040	TE-161	171	02050364	20020927	6月	12/25
0030002001	TE-161S	40	05110271	20051231	6月	9/19
0030002002	TE-161S	41	05110272	20051231	6月	5/9
0030002003	TE-161S	42	05110273	20051231	6月	6/13
0030002004	TE-161S	43	05110274	20051231	6月	10/19
0030002005	TE-161S	44	05110301	20051231	6月	6/1
0030002006	TE-161S	45	05110303	20051231	6月	6/15
0030002007	TE-161S	46	05120284	20051231	6月	8/24
0030002008	TE-161S	47	05120285	20051231	6月	5/31
0030002009	TE-161S	48	05120286	20051231	7月	1/10
0030002010	TE-161S	49	05120287	20051231	7月	6/20
0030002011	TE-161S	50	05120289	20051231	7月	12/27
0030002012	TE-161S	51	06020006	20060331	7月	12/27
0030002013	TE-161S	52	06020023	20060331	7月	4/12
0030002014	TE-161S	53	06020914	20060331	7月	12/1

0030002015	TE-161S	54	06020915	20060331	7月	10/30
0030002016	TE-161S	55	06020958	20060331	7月	11/1
0030002017	TE-161S	56	06020959	20060331	7月	3/2
0030002018	TE-161S	57	06020963	20060331	7月	9/3
0030002019	TE-161S	58	06020967	20060331	7月	11/1
0030002020	TE-161S	59	06012019	20070301	7月	11/1
0030002021	TE-161S	60	07010023	20071005	7月	11/1
0030002022	TE-161S	61	0910000401	20100303	7月	6/14
0030002023	TE-161S	62	0910000402	20100303	7月	10/19
0030002024	TE-161S	63	0910000403	20100303	7月	6/12
0030002025	TE-161S	64	0910000404	20100303	7月	8/28
0030002026	TE-161S	65	0910000405	20100303	7月	6/12
0030002027	TE-161S	66	0910000406	20100303	7月	5/8
0030002028	TE-161S	67	0910000407	20100303	7月	10/30
0030002029	TE-161S	68	0910000408	20100303	7月	12/28
0030002030	TE-161S	69	0910000409	20100303	7月	12/28
0030002031	TE-161S	70	0910000410	20100303	8月	12/27
0030002032	TE-161S	71	0910000411	20100303	8月	3/14
0030002033	TE-161S	72	0910000412	20100303	8月	7/18
0030002034	TE-161S	73	0910000413	20100303	8月	1/4
0030002035	TE-161S	74	0910000414	20100303	8月	4/21
0030002036	TE-161S	75	0910000415	20100303	8月	5/26
0030002037	TE-161S	76	0910000416	20100303	8月	12/28
0030002038	TE-161S	77	0910000417	20100303	8月	6/12
0030002039	TE-161S	78	0910000418	20100303	8月	1/9
0030002040	TE-161S	79	0910000419	20100303	8月	6/13
0030002041	TE-161S	80	0910000420	20100303	8月	11/10
0030002042	TE-161S	81	0910000421	20100303	8月	8/14
0030002043	TE-161S	82	0910000422	20100303	8月	12/15
0030002044	TE-161S	83	0910000423	20100303	8月	12/27
0030002045	TE-161S	84	0910000424	20100303	8月	12/4
0030002046	TE-161S	85	0910000425	20100303	8月	1/11
0030002047	TE-161S	86	0910000426	20100303	8月	5/8
0030002048	TE-161S	87	0910000427	20100303	8月	6/2
0030002049	TE-161S	88	0910000428	20100303	8月	12/21
0030002050	TE-161S	89	0910000429	20100303	8月	4/13
0030002051	TE-161S	90	0910000430	20100303	9月	5/26
0030002052	TE-161S	91	0910000431	20100303	9月	11/27
0030002053	TE-161S	92	0910000432	20100303	9月	12/5
0030002054	TE-161S	93	0910000433	20100303	9月	11/2
0030002055	TE-161S	94	0910000434	20100303	9月	1/9
0030002056	TE-161S	95	0910000435	20100303	9月	4/18
0030002057	TE-161S	96	0910000436	20100303	9月	4/21
0030002058	TE-161S	97	0910000437	20100303	9月	12/5
0030002059	TE-161S	98	0910000438	20100303	9月	12/25
0030002060	TE-161S	99	0910000439	20100303	9月	8/17
0030002061	TE-161S	100	0910000440	20100303	9月	1/10
0030002062	TE-161S	101	1004000340	20100521	9月	12/11
0030002063	TE-161S	102	1004000341	20100521	9月	2/14
0030002064	TE-161S	103	1004000342	20100521	9月	12/21
0030002065	TE-161S	104	1004000343	20100521	9月	6/26
0030002066	TE-161S	105	1004000344	20100521	9月	4/17
0030002067	TE-161S	106	1004000345	20100521	9月	6/9
0030002068	TE-161S	107	1004000346	20100521	9月	7/3
0030002069	TE-161S	108	1004000347	20100521	9月	12/19
0030002070	TE-161S	109	1004000348	20100521	9月	7/6
0030002071	TE-161S	110	1004000349	20100521	9月	6/12
0030002072	TE-161S	111	1004000350	20100521	9月	8/22
0030002073	TE-161S	112	1004000351	20100521	9月	3/12

0030002074	TE-161S	113	1004000352	20100521	9月	12/14
0030002075	TE-161S	114	1004000353	20100521	9月	10/29
0030002076	TE-161S	115	1004000354	20100521	10月	2/15
0030002077	TE-161S	116	1004000355	20100521	10月	4/21
0030002078	TE-161S	117	1004000356	20100521	10月	1/9
0030002079	TE-161S	118	1004000357	20100521	10月	4/21
0030002080	TE-161S	119	1004000358	20100521	10月	1/9
0030002081	TE-161S	120	1004000359	20100521	10月	4/17
0030002082	TE-161S	121	1004000360	20100521	10月	12/25
0030002083	TE-161S	122	1004000361	20100521	10月	6/9
0030002084	TE-161S	123	1004000362	20100521	10月	1/4
0030002085	TE-161S	124	1004000363	20100521	10月	11/30
0030002086	TE-161S	125	1004000364	20100521	10月	12/21
0030002087	TE-161S	126	1004000365	20100521	10月	2/21
0030002088	TE-161S	127	1004000366	20100521	10月	4/3
0030002089	TE-161S	128	1004000367	20100521	10月	11/24
0030002090	TE-161S	129	1004000368	20100521	10月	6/9
0030002091	TE-161S	130	1004000369	20100521	10月	5/31
0030002092	TE-161S	131	1004000370	20100521	10月	12/14
0030002093	TE-161S	132	1004000371	20100521	10月	1/10
0030002094	TE-161S	133	1004000372	20100521	10月	12/20
0030002095	TE-161S	134	1004000373	20100521	11月	12/20
0030002096	TE-161S	135	1004000374	20100521	11月	4/27
0030002097	TE-161S	136	1004000375	20100521	11月	7/29
0030002098	TE-161S	137	1004000376	20100521	11月	12/25
0030002099	TE-161S	138	1004000377	20100521	11月	6/2
0030002100	TE-161S	139	1004000378	20100521	11月	6/7
0030002101	TE-161S	140	1004000379	20100521	11月	8/24
0030002102	TE-161S	141	1004000380	20100521	11月	6/14
0030002103	TE-161S	142	1004000381	20100521	11月	6/16
0030002104	TE-161S	143	1004000382	20100521	11月	6/1
0030002105	TE-161S	144	1004000383	20100521	11月	10/19
0030002106	TE-161S	145	1004000384	20100521	11月	7/6
0030002107	TE-161S	146	1004000385	20101122	11月	9/28
0030002108	TE-161S	147	1004000386	20101122	11月	4/21
0030002109	TE-161S	148	1004000387	20101122	11月	6/12
0030002110	TE-161S	149	1004000388	20101122	11月	6/1
0030002111	TE-161S	150	1004000389	20101122	11月	6/17
0030002112	TE-161S	151	1004000390	20101122	11月	12/25
0030002113	TE-161S	152	1004000391	20101122	11月	1/31
0030002114	TE-161S	153	1004000392	20101122	11月	6/2
0030002115	TE-161S	154	1004000393	20101122	11月	7/7
0030002116	TE-161S	155	1004000394	20101122	11月	5/26
0030002117	TE-161S	156	1004000395	20101122	11月	12/28
0030002118	TE-161S	157	1004000396	20101122	11月	12/27
0030002119	TE-161S	158	1004000397	20101122	11月	1/29
0030002120	TE-161S	159	1004000398	20101122	12月	10/30
0030002121	TE-161S	160	1004000399	20101122	12月	4/3
0030002122	TE-161S	161	1009000600	20101122	12月	8/28
0030002123	TE-161S	162	1009000601	20101122	12月	12/12
0030002124	TE-161S	163	1009000602	20101122	12月	11/1
0030002125	TE-161S	164	1009000603	20101122	12月	9/5
0030002126	TE-161S	165	1009000604	20101122	12月	4/5
0030002127	TE-161S	166	1009000605	20101122	12月	10/30
0030002128	TE-161S	167	1009000606	20101122	12月	11/10
0030002129	TE-161S	168	1009000607	20101122	12月	5/31
0030002130	TE-161S	169	1009000608	20101122	12月	1/29
0030002131	TE-161S	170	1009000609	20101122	12月	10/29
0030002133	TE-161S	173	1106000485	20110701	12月	6/1

0030002134	TE-161S	174	1106000616	20110701	12月	6/19
0030002135	TE-161S	175	1106000757	20110701	12月	9/28
0030002136	TE-161S	176	1501021051	20150928	12月	1/22
0030002137	TE-161S	177	1501021052	20150928	12月	12/26
0030002138	TE-161S	178	1501021053	20150928	1月	1/31
0030002139	TE-161S	179	1501021054	20150928	1月	12/22
0030002140	TE-161S	180	1501021055	20150928	1月	4/28
0030002141	TE-161S	181	1501021056	20150928	1月	4/21
0030002142	TE-161S	182	1501021057	20150928	1月	11/10
0030002143	TE-161S	183	1501021058	20150928	1月	8/21
0030002144	TE-161S	184	1501021059	20150928	1月	10/30
0030002145	TE-161S	185	1501021060	20150928	1月	6/20
0030002146	TE-161S	186	1501021061	20150928	1月	12/15
0030002147	TE-161S	187	1501021062	20150928	1月	1/4
0030002148	TE-161S	188	1501021063	20150928	1月	1/10
0030002149	TE-161S	189	1501021064	20150928	1月	12/27
0030002150	TE-161S	190	1501021065	20150928	1月	1/30
0030002151	TE-161S	191	1501021066	20150928	1月	12/27
0030002152	TE-161S	192	1501021067	20150928	1月	9/28
0030002153	TE-161S	193	1501021068	20150928	1月	7/14
0030002154	TE-161S	194	1501021069	20150928	2月	1/15
0030002155	TE-161S	195	1501021070	20150928	2月	12/21
0030002156	TE-161S	196	1501021071	20150928	2月	4/21
0030002157	TE-161S	197	1501021072	20150928	2月	4/27
0030002158	TE-161S	198	1501021073	20150928	2月	12/13
0030002159	TE-161S	199	1501021074	20150928	2月	5/29
0030002160	TE-161S	200	1501021075	20150928	2月	11/10
0030002161	TE-161S	201	1501021076	20150928	2月	3/29
0030002162	TE-161S	202	1501021077	20150928	2月	9/28
0030002163	TE-161S	203	1501021078	20150928	2月	12/8
0030002164	TE-161S	204	1501021079	20150928	2月	12/25
0030002165	TE-161S	205	1501021080	20150928	2月	11/10
0030002166	TE-161S	206	1501021081	20150928	3月	1/26
0030002167	TE-161S	207	1501021082	20150928	3月	12/17
0030002168	TE-161S	208	1501021083	20150928	3月	8/21
0030002169	TE-161S	209	1501021084	20150928	3月	12/27
0030002170	TE-161S	210	1501021085	20150928	3月	12/15
0030002171	TE-161S	211	1501021086	20150928	3月	1/9
0030002172	TE-161S	212	1501021087	20150928	3月	1/4
0030002173	TE-161S	213	1501021088	20150928	3月	6/23
0030002174	TE-161S	214	1501021089	20150928	3月	1/11
0030002175	TE-161S	215	1501021090	20150928	3月	12/11

管理No	一般名称	番号	製品番号	使用開始日	定期点検月	点検日
0040003001	TE-331S	16	0709000251	20071026	4月	6/5
0040003002	TE-331S	17	0709000252	20071018	4月	5/12
0040003004	TE-331S	19	1207000062	20120830	4月	7/31
0040003005	TE-331S	20	1207000063	20120830	4月	6/9
0040003006	TE-331S	21	1207000064	20120830	4月	5/29
0040003007	TE-331S	22	1207000161	20120830	4月	8/21
0040003008	TE-331S	23	1207000162	20120830	4月	12/5
0040003009	TE-331S	24	1207000163	20120830	5月	6/12
0040003010	TE-331S	25	1207000164	20120830	5月	9/11
0040003011	TE-331S	26	1207000165	20120830	5月	5/29
0040003012	TE-331S	27	1207000166	20120830	5月	7/31
0040003013	TE-331S	28	1207000167	20120830	5月	12/8
0040003014	TE-332S	66	1303000065	20160210	5月	5/26
0040003015	TE-332S	67	1303000066	20160210	5月	5/12
0040003016	TE-332S	68	1303000068	20160210	6月	4/28